

Troop Elevation Pillow Addition: Gebruiksaanwijzing

Beschrijving

De Troop Elevation Pillow Addition (TEPA) of de Addition is een wigvormige positioneerhulp die ontworpen is voor gebruik met de Troop Elevation Pillow. De Addition moet geplaatst worden op de bovenkant van het Troop Elevation Pillow en er moet een hoofdwieg of een standaardintubatiekussen geplaatst worden op de bovenkant van het platte/vlakke deel van de Addition om het luchtwegbeheer van morbide obese patiënten te verbeteren.

Gebruik



Het Troop Elevation Pillow (TEP) + de Addition (TEPA) + de Head Cradle (H.C.) zijn ontworpen om **uiterst morbide obese patiënten in de H.E.L.P.-positie (laryngoscopiepositie met verhoogd hoofd)** te plaatsen. Als algemene regel is de combinatie TEP + TEPA + H.C. aanbevolen voor patiënten die 200 tot 225 kg of meer wegen of voor patiënten wier **BMI groter is dan 50**. Het is belangrijk rekening te houden met de hoogte-/gewichtverhouding van de patiënt wanneer er als klinische indicatie overwogen wordt de TEPA te gebruiken. Een uiterst morbide obese patiënt wiens gewicht zich voornamelijk bevindt in de buik en de bovenste borststreek (in tegenstelling tot de taille en de heupen) haalt hieruit waarschijnlijk het grootste voordeel. De **Troop Elevation Pillow Addition (TEPA)** is verkrijgbaar als een wegwerpbaar of herbruikbaar product dat bedekt is met vinyl en dat ontworpen is om geplaatst te worden op de bovenkant van de met vinyl bedekte Troop Elevation Pillow. **Er is een wegwerpbaar chirurgische barrièrehoes (wordt apart verkocht) aanbevolen om de TEPA en de Troop Elevation Pillow uit vinyl te bedekken en te beschermen.**