

Ajout au Troop Elévation Pillow : Mode d'emploi

Description

Le Troop Elevation Pillow Addition (TEPA) ou l'ajout est un positionneur en forme de coin conçu pour être utilisé avec le Troop Elevation Pillow. L'ajout est placé au-dessus du Troop Elevation Pillow et un serre-tête ou un oreiller intubant standard est placé sur le dessus de la partie plate/plateau de l'ajout pour aider à améliorer la gestion de des voies respiratoires des patients présentant une obésité morbide.

Utilisation



Le Troop Elevation Pillow (TEP) + l'ajout (TEPA) + le serre-tête (H.C.) sont conçus pour le positionnement du patient présentant une obésité morbide importante en position H.E.L.P. (position de laryngoscopie avec tête élevée). À titre de recommandation générale, le TEP + TEPA + H.C. est recommandé pour les patients pesant 200 à 225 kilogrammes ou plus ou les patients dont l'IMC est supérieur à 50. La taille et la répartition de poids du patient sont des observations importantes en considérant l'indication clinique pour employer le TEPA. Par exemple, un patient présentant une obésité morbide importante dont le poids est principalement dans l'abdomen et la partie supérieure de la poitrine (par rapport à la taille et la hanche) est plus susceptible de recevoir le plus d'avantages.

Le Troop Elevation Pillow Addition (TEPA) est disponible sous forme de produit jetable ou réutilisable recouvert de vinyle conçu pour être placé sur le dessus du Troop Elevation Pillow couvert de vinyle. Une couverture de barrière chirurgicale jetable (vendue séparément) est recommandée pour couvrir et protéger le TEPA en vinyle et le Troop Elevation Pillow couvert de vinyle.