

Troop Elevation Pillow Addition: Gebrauchsanleitung

Beschreibung

Das Troop Elevation Pillow Addition (TEPA) oder das **Zusatzpolster** ist ein keilförmiges Positionierungskissen, das in Kombination mit dem Troop Elevation Pillow verwendet wird. Das Zusatzpolster wird auf das Troop Elevation Pillow gelegt, und ein Kopfpolster oder ein Standard-Intubationskissen wird auf den oberen flachen/ebenen Teil des Zusatzpolsters positioniert, um die Atemwegssicherung bei krankhaft übergewichtigen Patienten zu verbessern.

Verwendung



Das Troop Elevation Pillow (TEP) in Kombination mit dem Zusatzpolster (TEPA) und dem Kopfkissen (H.C.) wurden zur **Positionierung eines krankhaft übergewichtigen Patienten in die H.E.L.P.-Position** (erhöhte Laryngoskopie-Lagerung) entwickelt. Allgemein wird empfohlen, das Zusatzpolster (TEPA) zusammen mit dem Troop Elevation Pillow (TEP) und dem Kopfkissen (H.C.) bei Patienten mit einem Gewicht ab ca. 200-225 kg bzw. einem **BMI höher als 50 zu nutzen**. Die Größen- und Gewichtsverteilung des Patienten sind wichtige Kriterien bei der Entscheidung, ob das TEPA-Zusatzpolster verwendet werden sollte. Zum Beispiel ist es wahrscheinlicher, dass ein krankhaft übergewichtiger Patient, dessen Gewicht hauptsächlich am Bauch und im oberen Brustbereich verteilt ist (im Gegensatz zum Taillen- und Hüftbereich), eher von diesem Polstersystem profitiert.

Das **Troop Elevation Pillow Addition (TEPA)** ist als Einweg- oder wiederverwendbares Produkt mit Vinylüberzug erhältlich, das auf dem mit Vinyl überzogenen Troop Elevation Pillow platziert werden kann. **Es wird die Verwendung von Einmal-Schutzbezügen (separat erhältlich) empfohlen, um die Hülle aus Vinyl des Troop Zusatzpolsters (TEPA) und des Troop Elevation Pillow abzudecken und zu schützen.**