

## Troop Elevation Pillow Addition: Istruzioni per l'uso

### Descrizione

La Troop Elevation Pillow Addition (TEPA) ovvero l'Aggiunta è un posizionatore cuneiforme studiato per essere utilizzato con il cuscino Troop Elevation Pillow. L'Aggiunta viene posizionata sopra il Troop Elevation Pillow e un poggiatesta o un cuscino standard da intubazione viene posizionato sopra alla parte piatta / piana dell'Integrazione per aiutare a migliorare la gestione delle vie aeree nei pazienti patologicamente obesi.

### Utilizzo



Il Troop Elevation Pillow (TEP) + l'Aggiunta (TEPA) + il poggiatesta (H.C.) sono concepiti per collocare i pazienti patologicamente molto obesi nella posizione H.E.L.P. (posizione per laringoscopia a testa sollevata). In linea generale, l'insieme TEP + TEPA + H.C. è indicato per i pazienti che pesano tra i 200 e i 225 kg o più o per i pazienti il cui IMC è superiore a 50. La distribuzione dell'altezza e del peso del paziente rappresentano osservazioni importanti quando si considera l'indicazione clinica per utilizzare la TEPA. Ad esempio, un paziente patologicamente molto obeso il cui peso è principalmente concentrato nel ventre e nella parte superiore del petto (rispetto alla zona della vita e delle anche) è più probabile che tragga maggiore beneficio.

La Troop Elevation Pillow Addition (TEPA) è disponibile come prodotto in versione monouso o riutilizzabile ricoperto da PVC studiato per essere posizionato in cima al Troop Elevation Pillow anch'esso ricoperto in PVC. Si consiglia una **copertura chirurgica a barriera monouso** (venduta separatamente) per ricoprire e proteggere la TEPA in PVC e il Troop Elevation Pillow sempre in PVC.