

Suplemento de Troop Elevation Pillow:

Indicaciones de uso

Descripción

El Suplemento de Troop Elevation Pillow Addition (TEPA, por su sigla en inglés) o el **Suplemento** es un posicionador en forma de cuña diseñado para usarse con la Troop Elevation Pillow. El Suplemento se coloca encima de la Troop Elevation Pillow y se pone un cabezal o una almohada de intubación estándar encima de la parte plana o tope del Suplemento para ayudar a mejorar el manejo de las vías respiratorias de los pacientes con obesidad mórbida.

Uso



La Troop Elevation Pillow (TEP) + el Suplemento (TEPA) + el Cabezal (H.C.) están diseñados para **colocar al paciente con obesidad mórbida en la posición H.E.L.P.** (posición de laringoscopia con la cabeza elevada). Como guía general, se recomienda el TEP + TEPA + H.C. para pacientes que pesen de 200 a 225 kilogramos o más o para pacientes cuyo **IMC sea mayor de 50.** La altura y la distribución del peso del paciente son observaciones importantes al considerar la indicación clínica para usar el TEPA. Por ejemplo, un paciente súper obeso mórbido cuyo peso se encuentra principalmente en el abdomen y la parte superior del tórax (frente a la zona de la cintura y la cadera) tiene más probabilidades de obtener el mayor beneficio.

El **Suplemento de la Troop Elevation Pillow (TEPA)** está disponible como producto cubierto de vinilo desechable o reutilizable diseñado para colocarse encima de la Troop Elevation Pillow cubierta de vinilo. **Se recomienda una cubierta de barrera quirúrgica desechable (vendida por separado) para cubrir y proteger el TEPA de vinilo y la Troop Elevation Pillow de vinilo.**