

## Troop Elevation Pillow Addition: Bruksanvisning

### Beskrivning

Troop Elevation Pillow Addition (TEPA) eller ***Addition*** är ett kilformat positionshjälpmedel som utformats för att användas av narkosläkare tillsammans med Troop Elevation Pillow. Addition placeras ovanpå Troop Elevation Pillow och ett huvudstöd eller standardintuberande kudde placeras ovanpå den Additions platta del / plåtå för att förbättra luftvägshandlingen i patienter med sjuklig fetma.

### Bruk



Troop Elevation Pillow (TEP) + Addition (TEPA) + Head Cradle (H.C.) är utformade för att ***placera patienter med super obesitas i H.E.L.P.-positionen*** (med upphöjt huvud). Som en allmän riktlinje rekommenderas TEP + TEPA + H.C. för patienter som väger mellan 450 och 500 pund (200-225 kg) och uppåt eller för patienter vars ***BMI är över 50***. Patientens längd och viktfordelning är viktiga observationer när man överväger de kliniska fördelarna med att använda TEPA. Till exempel är det mycket troligt att en patient med super obesitas vars vikt främst ligger i buken och det övre bröstområdet (jämfört med midjan och höftområdet) är mer benägen att dra nytta av den. ***Troop Elevation Pillow Addition (TEPA)*** är tillgänglig för engångsbruk eller som en återanvändbar vinyltäckt produkt och är utformad för att placeras ovanpå den vinyltäckta Troop Elevation Pillow. ***En kirurgisk barriär för engångsbruk (säljs separat) rekommenderas för att täcka över och skydda TEPA och Troop Elevation Pillow i vinyl.***